

## APLICADORES DE BOLOS Z20/Z52



### Ventajas para el Cliente:

- Aplicador ligero
- Forma ergonómica
- Rápida inserción de los bolos
- Larga vida útil

### Descripción del producto:

Este aplicador de acero inoxidable se usa para introducir al rumiante los bolos Rumitag Z20 y Z52. El aplicador tiene la exacta curvatura con el fin de no hacer ni el más mínimo daño al animal durante el proceso de aplicación.

Tanto el diseño de la curvatura como el mecanismo de sujeción de los bolos están patentados.

Está disponible en dos dimensiones: corto y largo. El corto sólo puede utilizarse para los bolos Z20, en cambio el largo puede ser utilizado tanto para el bolo Z52 como para el Z72 gracias a la boquilla intercambiable.

## RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE LOS BOLOS:

1. Saque el bolo del paquete y con un lector compruebe que el chip se puede leer correctamente.
2. Introducir el bolo en el aplicador.
3. Sitúese al lado de la cabeza del animal, abra su boca y mantenga la lengua en la parte baja del paladar.
4. Inserte la boquilla del aplicador en la cavidad oral del animal. **No tire para arriba la cabeza del animal.**
5. Apriete suavemente el gatillo del aplicador para la liberación del bolo al mismo tiempo que saca ligeramente el aplicador.
6. Cuando el aplicador está fuera de la boca, libere la cabeza y la mandíbula del animal. Al liberar la cabeza del animal, permitimos que la deglución sea más fácil y espontánea.
7. Compruebe que el animal haya tragado el bolo. Si todavía está en la boca del animal éste será eventualmente escupido después de que el animal lo mastique haciendo ruido característico. Recoja el bolo y repita el proceso.
8. Si el animal no expulsa el bolo, compruebe que el animal realmente ha deglutido el bolo descendiendo por el esófago hasta el retículo o el rumen.
9. Una vez el proceso inicial de deglución está finalizado (fase involuntaria) se puede usar un lector de mano (eventualmente con la antena stick) para comprobar la posición del bolo en el retículo. Si el bolo no ha sido completamente tragado, puede estar localizado en la boca o al principio del esófago. En este caso, un masaje hacia abajo en el cuello del animal puede ayudar a tragar.
10. La aplicación está completada cuando el lector indica que el bolo está presente en la región del retículo, que está localizado en el lado izquierdo cerca del corazón del animal.

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

### Corto:

Altura:	13,5 cm
Largo total del tubo:	22,5 cm
Largo del tubo (antes curvatura):	13,2 cm
Diámetro:	12,2 mm
Angulo de curvatura:	30°



### Largo:

Altura:	13,5 cm
Largo total del tubo:	31 cm
Largo del tubo (antes curvatura):	21,4 cm
Diámetro:	12,2 mm
Angulo de curvatura:	30°



Sujeto a cambio sin previo aviso

DATAMARS es un proveedor líder mundial con 20 años de experiencia en la industria para la identificación con soluciones de alta prestación basadas en tecnología de Radiofrecuencia. Habiendo ampliado su rango de productos a los identificadores, lectores y antenas de Rumitag, desarrollados y vendidos internacionalmente durante más de 20 años para una rápida y eficiente identificación de ganado, DATAMARS provee a los ganaderos de todo el mundo con productos y soporte técnico que faciliten el trabajo del día a día gracias al uso de la identificación electrónica.

# DATAMARS

Corporate Headquarters:

Via ai Prati  
6930 Bedano-Lugano  
Switzerland  
Phone: +41 91 935 73 80  
Fax: +41 91 945 03 30

[livestock-id@datamars.com](mailto:livestock-id@datamars.com)

[www.datamars.com](http://www.datamars.com)